



KIT DE PROTECTION PERSONNEL SOIGNANT

Fiche Technique HOSTO-MANCH

Paire de manchettes (obligatoirement avec sur-blouse page 2)



- ✓ **Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes**
- ✓ **Paire de manchettes liées par une bande plastique**
- ✓ **Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections**

Caractéristiques

Type	Manchette de protection
Dimensions 1 manchette (IxL)	260x750 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	30 µ (+/- 8%)
Couleur	Translucide teinté bleu
Type de lien	sans
Type de sac	-
Type de soudure	Traditionnelle
Bande Papier	Oui / non personnalisée

Composition

PE Basse Densité

Logistique

EAN CODE	0370006021600
Conditionnement	10 rouleaux de 20 soit 200 paires de manchettes
Dimensions du carton	292 x 250 x 175
Nb cartons/couche	12
Nb cartons/palette	49
Nb couches/palette	4 couches + 1 rang de 1 carton
Nb produits /palette	9800 manchettes
Dimensions palette Palette Europe avec échange	800x1200 mm

IMPORTANT

Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes

Impression des sacs

Libellé impression	Sans
Type d'impression	Non
Couleur d'impression	

Visuel produit

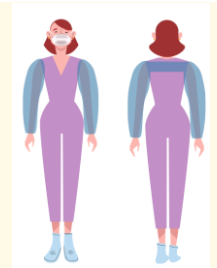


Photo non contractuelle

PROTOCOLE D'UTILISATION MANCHETTE

Les mettre:

- 1) Retirer la partie prédécoupée au centre.
- 2) Glisser les bras dans les 2 manchettes.
- 3) Passer la bande plastique derrière la tête

Les retirer:

- 1) Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus.
- 2) Retirer les manchettes de l'épaule vers le poignet en les retournant.

Voir mode d'emploi

Certifications



Secteur d'utilisation



Santé

Sur-blouse

(obligatoirement avec paire de manchettes page 1)

- ✓ Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
- ✓ Une blouse intégrant trous pour passage tête et bras, et prédécoupe dans le dos
- ✓ Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections



Caractéristiques

Type	Sur-blouse de protection
Dimensions (l x h)	800x1300 mm (+/- 2,5%)
Épaisseur	35 µ (+/- 8%)
Couleur	Translucide teinté bleu
Type de lien	sans
Type de sac	-
Type de soudure	Traditionnelle
Bande Papier	Oui / non personnalisée

Impression des sacs

Libellé impression	Sans
Type d'impression	Non
Couleur d'impression	

Visuel produit

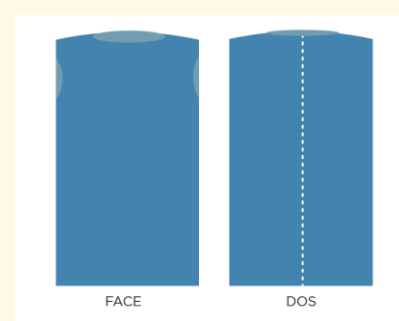


Photo non contractuelle

Composition

PE Basse Densité

Logistique

EAN CODE	03700036021587
Conditionnement	10 rouleaux de 20 soit 200 sur-blouses
Dimensions du carton	445X250X200
Nb cartons/couche	7
Nb cartons/palette	49
Nb couches/palette	7
Nb produits /palette	9800 Sur-blouses
Dimensions palette Palette Europe avec échange	800x1200 mm

PROTOCOLE D'UTILISATION SUR-BLOUSE

Enfiler la blouse :

- 1) Passer les bras dans les ouvertures.
- 2) Passer la tête dans l'ouverture.
- 3) Ajuster en couvrant bien les épaules.

Retirer la blouse :

- 1) Déchirer la prédécoupe dans le haut du dos en tirant de chaque côté.
- 2) La retirer impérativement en tirant vers l'avant et vers le bas.

Voir mode d'emploi

Certifications



Secteur d'utilisation



Santé

IMPORTANT

Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes