

PURELL® Antimicrobial Wipes Plus PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus

Lingettes désinfectantes pour les surfaces

Marchés cibles : milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgences, loisirs



- **Produit actif sur Coronavirus¹ et sur virus de la Vaccine (Orthopoxvirus)² selon EN 14476+A2 (v. 2019)**
- **Large spectre d'action (bactéries, levures, sélection de virus)**
- **Facile à utiliser**

INFORMATIONS TECHNIQUES				
Substances actives	Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 g/kg), Chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg)			
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Non-tissé : spunbonded blanc, 22g/m² • Parfum : mentholé 			
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Durée de conservation : 24 mois avant ouverture, conserver à l'abri de la chaleur dans des conditions normales de stockage • Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé • Éviter les températures supérieures à 40°C 			
Mode d'emploi	<p>1. Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.</p> 	<p>2. Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter. Bien refermer le conditionnement après usage.</p> 	<p>3. Laisser agir 15 minutes. Ne pas rincer. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.</p> 	<p>4. Jeter les lingettes usagées selon les consignes de l'étiquetage.</p> 
Réglementation	<ul style="list-style-type: none"> • Produit biocide TP2 • Usage exclusivement professionnel 			
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas avaler • Ne pas utiliser avec d'autres produits • Réservé à un usage sur des surfaces, des objets et des petits matériels ne présentant pas de rugosité • L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection) • En cas de réutilisation, risque de contamination • Ne pas utiliser une lingette si elle est sèche • Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité du produit • En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche 			

* Test réalisé sur Coronavirus BCoV (virus modèle), 30 secondes.

** Dont fait partie le virus responsable de la Variole du Singe.

ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE		
Actif sur	Norme	Temps de contact
Bactéries	EN 1276* (v. Août 2019), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> et <i>Enterococcus hirae</i>	30s
	EN 13727+A2* (v. Décembre 2015), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> et <i>Enterococcus hirae</i>	30s
	EN 13697+A1* (v. Juillet 2019), <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> et <i>Enterococcus hirae</i>	1 min
	EN 16615* (v. Mai 2015), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> et <i>Enterococcus hirae</i> Norme réalisée sur la lingette imprégnée	15 min
Levures	EN 1650* (v. Août 2019), <i>Candida albicans</i>	1 min
	EN 13624 (v. Novembre 2013), <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 13624 (v. Novembre 2021), <i>Candida auris</i>	1 min
	EN 13697 (v. Juin 2015), <i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 13697+A1 (v. Juillet 2019), <i>Candida auris</i>	5 min
	EN 16615* (v. Mai 2015), <i>Candida albicans</i> Norme réalisée sur la lingette imprégnée	15 min
Virus	EN 14476+A2* (v. Juillet 2019), Coronavirus BCoV (virus modèle)	30s
	EN 14476+A2* (v. Juillet 2019), Virus de la Vaccine (MVA) Spectre d'activité couvrant notamment les virus enveloppés suivants : Orthopoxvirus (dont fait partie le virus responsable de la Variole du Singe), Herpès, Hépatites B et C, VIH...	30s

* Étude réalisée en conditions de propreté.

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS DE LA LINGETTE	CODE PRODUIT
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boîte de 100 lingettes x 12	130 x 210 mm	9202-12-EEU00
PURELL Lingettes Antimicrobiennes Plus – Boîte de 270 lingettes x 6	150 x 170 mm	9213-06-EEU00

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, Espagne
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Boulevard du Pont-d'Arve 28
1205 Genève

GOJO Central Europe GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 18
63322 Rödermark, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685